


# ご使用方法

---シャボンチャン SH-8---


**■使用石鹼液** 一般に市販されている水石鹼を石鹼液タンクに入れてください。粘い石鹼液、または固形物の混ざった石鹼液は使用できません。

**■石鹼ポンプ** 石鹼液ポンプはその特性上、ポンプ内部に空気があると液体を吸入しませんので、ポンプ内部を液体で充填する必要があります。石鹼液タンクに水石鹼液を注入後、テストスイッチを倒して、石鹼液ノズルから石鹼液が出てくるまで石鹼液ポンプを駆動してください。(約10秒)

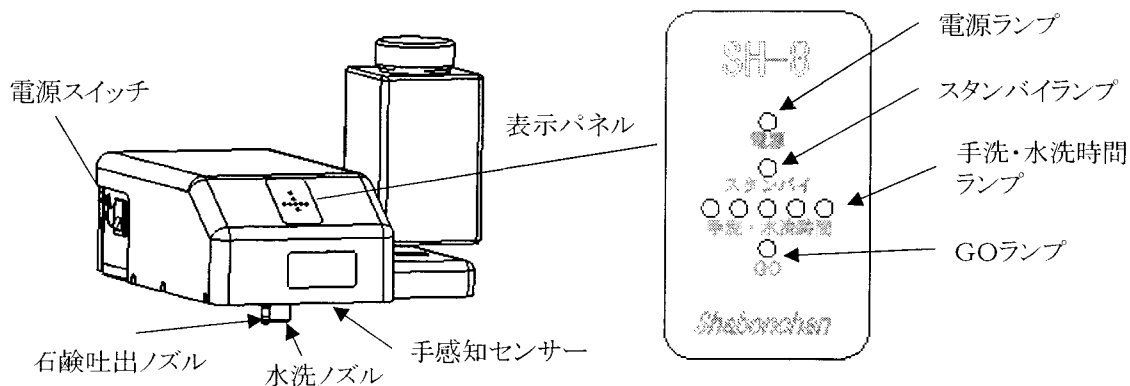


①電源スイッチをONにする 電源ランプが点灯します、約5秒後にスタンバイランプが点灯して、使用可能になります

スタンバイランプ  
が点灯しています

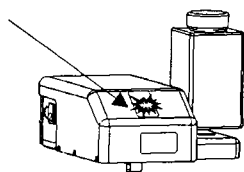


GOランプが  
点灯します

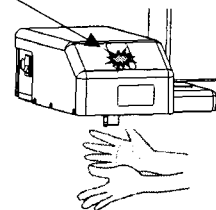

②ノズルの下に  
手を差出す

水が出ます  
(約3秒)

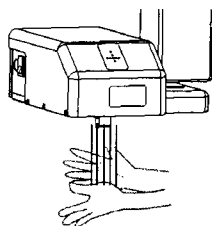


⑤GOランプが点灯し  
たらノズルのしたに手  
を差し出す

水が出ます


③手の汚れを落して手  
指全体を濡らす

石鹼液が出ます  
(約2秒)

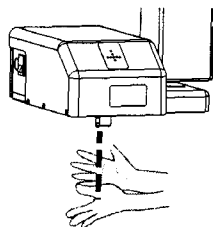


⑥流水で石鹼液を洗  
い流す(10秒以上)

手洗・水洗時間ラ  
ンプが順次消灯しま  
す(注)

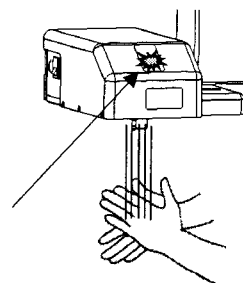

④手・指・肘全体に石鹼液を  
塗布し、爪ブラシを使用して  
手、指、腕、全体を洗う  
(10秒以上)

手洗・水洗時間  
ランプが順次消  
灯します(注)

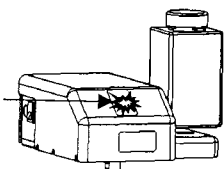

⑦ペーパータオル、ハン  
ドドライヤー等で手を乾  
燥させる



(注) LEDランプが5ヶ点灯し時間の経過とともに順次消灯します、全部消灯すれば完了です。